

Product

Nummer **270**

Past op endotracheale tubes van maat 7,0-10,0 mm

Dale® Stabilock™ Endotracheale tubehouder

Voor een comfortabele en veilige stabilisatie

Productbeschrijving

Helpt accidentele extubatie te voorkomen.

Aanwijzingen voor het aanbrengen

1. De tube reinigen. Laten drogen.
2. De huid reinigen. Huidpreparatie aanbrengen. De ruglaag van de klevende basis verwijderen en direct op de bovenlip van de patiënt plaatsen. (A) Zo nodig bijknippen. De klevende basis kan worden aangebracht met de afgeronde lipjes naar boven of naar onder gericht.

Bij patiënten met trauma of gezichtshaar past u de klevende basis aan de individuele omstandigheden aan: breng het op de onderkaak aan met de afgeronde lipjes naar boven toe; of knip de afgeronde lipjes af en breng het op de wangen van de patiënt aan.

Ververs de klevende basis na 3 dagen of vroeger indien nodig.

3. Druk de halsband op het Velcro® gedeelte van de basis en zorg ervoor dat het tubekanaal op één lijn ligt met de endotracheale tube. (B)
4. Open de bevestigingslipjes aan beide uiteinden van de halsband en wikkel de band net onder de oren om het hoofd. . Maak de bevestigingslipjes aan de buitenkant van de halsband vast. (C)
5. Druk het kanaal omlaag op de endotracheale tube. (D)
6. Wikkel, net onder de locatiemarkering van de endotracheale tube, sterke tape (bijv. stoffen tape) stevig in een spiraalbeweging rond het kanaal en de tube om het geheel vast te zetten. **De tape moet op de endotracheale tube minstens 1" (2,5 cm) verder dan het kanaal worden gewikkeld.** (E)
Vervang de tape zoals nodig.

Zorg ervoor dat de halsband goed beveiligd is door de bevestigingslipjes opnieuw bij te stellen zoals nodig.

Herpositioneren van de tube: De bevestigingslipjes openen. De klevende basis op zijn plaats houden en de halsband van de basis pellen. De endotracheale tube herpositioneren. Op de basis drukken en de bevestigingslipjes vastzetten.

Verwijderen: De tape losmaken, de tube van het kanaal verwijderen, de halsband verwijderen en de klevende basis zachtjes afpellen.

Dale **beveelt aan om de endotracheale tube vaak te herpositioneren** om letsel aan de lippen en het onderliggende weefsel als gevolg van aanhoudende druk te voorkomen.

Dale **beveelt ten zeerste aan om de tubes van de beademingsapparatuur te ondersteunen** om de druk op de endotracheale tube te verminderen.

Handige checklist voor succesvol aanbrengen

- ✓ **Prepareer** de huid iedere keer dat de klevende basis wordt aangebracht
- ✓ **Plaats** de klevende basis direct boven de liplijn
- ✓ **Strak en in spiraalvorm** sterke tape om het kanaal en de tube wikkelen
- ✓ **Zorg ervoor dat** de tape om de tube minstens 2,5 cm voorbij het kanaal is gewikkeld
- ✓ **Verwijder** de klevende basis voorzichtig om beschadiging van de huid tot een minimum te beperken
- ✓ **Ondersteun** de tubes van de beademingsapparatuur

Voor een *in-service demonstratie, video over het aanbrengen en meer informatie, ga naar www.dalemed.com.*

Bestelinformatie
#H84102701 Dale® Stabilock™ endotracheale tubehouder Past op endotracheale tubes van maat 7,0-10,0 mm. Individueel verpakt in dozen van 10.
#H84102731 Dale® Stabilock™ klevende basis Individueel verpakt in dozen van 10.

Disposable. Voor gebruik bij één patiënt. Octrooi aangevraagd.
Voldoet aan de ACLS-richtlijnen.

De medische producten van Dale zijn verkrijgbaar bij uw voorkeursleverancier van ziekenhuis-/medische benodigdheden.

Latexvrij.

Gedrukt in de VS.

REV B