

PRODUKTNUMMER:

# H84106001

## **NASENVERBANDSHALTER**

passend für alle Größen

### **Beschreibung**

Der Dale-Nasenverbandshalter ersetzt Heftpflaster, das vielfach noch benutzt wird, um Nasenverbände zu fixieren. Der Halter verhindert Hautreizungen und vereinfacht den Verbandswechsel. Er verbessert den Patientenkomfort und ist gleichzeitig zeitsparend.

### **Gebrauchsanweisung**

1. Legen Sie das Plastikteil mittig unter der Nase und dem Nasenverband an. Ziehen Sie die Schlaufen über die Ohren des Patienten.
2. Um die Länge (vom Ohr zur Nase) zu verstellen, heben Sie das Ende des Bandes (Klettverschluss) an und bringen den Abstand auf das gewünschte Maß.
3. Befestigen Sie das Ende des Bandes in der neuen Position, und wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite. Restmaterial kann abgeschnitten werden.

### **Verbandswechsel**

Um den Verband zu wechseln, entfernen Sie eine Ohrschlaufe, wechseln den Verband und befestigen die Schlaufe wieder hinter dem Ohr.

### **Bestellinformation**

**#H84106001 Dale Nasenverbandshalter passend für alle Größen**  
In Zehnerpackungen erhältlich

DALE Nasenverbandshalter und andere Dale-Produkte erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

**Produkt enthält kein Latex**