

CODIC PRODOTTO

H84106001

FISSATORE PER MEDICAZIONE NASALE

Descrizione Prodotto

Il fissatore per medicazione nasale sostituisce il cerotto adesivo comunemente usato per fissare le medicazioni nasali. Elimina le irritazioni nasali, semplifica i cambi di medicazione, migliora il comfort del paziente e fa risparmiare tempo allo staff. Monopaziente.

Misura unica

Istruzioni per l'Applicazione

1. Centrare la parte in plastica sotto al naso e sopra la medicazione nasale. Posizionare i lacci attorno alle orecchie del paziente.
2. Per regolare la misura (dall'orecchio al naso) alzare la parte finale della fascia e spostare il laccio e la chiusura fino a raggiungere la lunghezza desiderata.
3. Piegare la parte finale sopra il laccio e la chiusura. Ripetere su entrambi i lati. La parte in eccesso può essere tagliata.

Per Cambiare la Medicazione

Per cambiare la medicazione nasale, rimuovere un laccio da il orecchio, cambiare la medicazione, e rimettere il laccio dietro l'orecchio.

Gamma Disponibile

**#H84106001 Fissatore per
medicazioni
nasali Dale**
Misura unica
Venduto in scatole
da 10 pezzi.

I prodotti DALE sono disponibili presso il vostro rivenditore abituale.

Prodotto Privo di Lattice

...tive:

...e B.V. Nieuwegein, NL.

...58 FAX: 31.30.280.0388