

PRODUTO NUMERO

# H84106001

## **FIXADOR NASAL**

Pediátrico/Adulto Pequeno

### **Descrição do Produto**

O fixador nasal Dale Nasal Dressing Holder substitui com vantagens o adesivo normalmente utilizado para estes fins, eliminando as irritações dérmicas, simplificando as tarefas de substituição de compressas, aumentando o conforto do paciente e poupando tempo.

Não reutilizar antes de desinfetar e lavar. Uso único por paciente. Tamanho único.

### **Instruções de Uso**

1. Centralizar a tira de plástica sobre o lábio superior e por cima da compressa. Colocar os elásticos á volta das orelhas do paciente.
2. Para ajustar a tira da orelha ao nariz, abrir e deslocar o elástico até obter o tamanho desejado.
3. Proceder da mesma forma para a outra orelha.
4. Para substituir o fixador nasal, retire o elástico de uma orelha, troque o fixador e passe á outra.

### **Informação para Pedido**

**#H84106001 Dale Fixador Nasal**  
Tamanho Único  
ex 10 unidades

Os produtos DALE estão disponíveis no seu fornecedor hospitalar.

**Produto sem Látex**



DALE MEDICAL PRO  
7 Cross Street, P.O  
TEL: 800-343-3980  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)