

Productnummer

H84106201

Niet steriel

Dale®

Transducer-Halter

Der **Dale® Transducer-Halter** ist eine flache und sichere Halterung, auf der bis zu drei Transducer für die hämodynamische Überwachung des Patienten angebracht werden können. Bei korrekter Platzierung an der phlebostatischen Achse sorgt der Dale® Transducer-Halter für optimale Stabilität der Transducer und unterstützt dadurch die richtige Funktion der numerischen Anzeige. Bei Verwendung des Dale® Transducer-Halters wird die Möglichkeit einer ungenauen Messung wegen falscher Positionierung oder Ausrichtung der Transducer verringert. Die Halterung kann an beiden Armen des Patienten befestigt werden und hat drei integrierte Klettaschen zur Aufnahme der Transducer. Die Halterung besteht aus einem angenehm weichen Material und wird mit einem elastischen, latex-freien Band mit verstellbaren Velcro®-Streifen am Arm befestigt.

Durch die drei Klettaschen wird der Zeit- und Arbeitsaufwand reduziert, da weder manuelles Ausrichten noch Festkleben einzelner Transducer auf der Brust oder am Arm und keine Montage am bettseitigen Infusionsständer erforderlich ist.

Schwierigkeiten beim Befestigen der Transducer mit Klebeband oder Neupositionierung des bettseitigen Infusionsständers aufgrund von Bewegungen des Patienten werden bei Verwendung des Dale® Transducer-Halters vollkommen eliminiert.

Anleitung zum Anlegen:

- 1.** Den Halter entlang der phlebostatischen Achse (auf Höhe der Brustmitte) ausrichten, elastisches Band um den Arm des Patienten wickeln und mit Velcro-Streifen fixieren.
- 2.** Die benötigten Klettaschen öffnen, durch die seitlichen Schlitze des Transducers stecken und die Lasche durch Andrücken wieder schließen.

Nur zur Verwendung an einem Patienten.

Bestellinformationen

#H8410**6201** **Dale® Transducer-Halter**
Passend für fast alle
Erwachsene. Einzeln verpackt.
Verpackungseinheit = 10 Stück.

Der Dale® Transducer-Halter und andere Dale-Produkte sind bei Ihrem Krankenhaus-Fachhändler erhältlich. **Latex-frei.**

Patent anhängig.

Velcro ist eine eingetragene Marke der Velcro USA, Inc.