

제품 번호

**H84106201**

소독 없음

**Dale®**

## 트랜스듀서 홀더

**Dale® 트랜스듀서 홀더**는 혈행역학적 감시 (hemodynamic monitoring) 환자에 사용되는 트랜스듀서를 최대 3개까지 장착할 수 있는 안정된 수평 플랫폼을 제공함으로써, 흉부 위치에 적절히 장착되었을 때 수치 표시판이 정상적으로 작동하도록 해주며 장착 상태가 적절치 못하거나 트랜스듀서의 수평 상태가 적절치 않아서 발생할 수 있는 측정 오류를 방지해 줍니다.

이 플랫폼은 환자의 팔에 잘 맞도록 설계되었으며 3단계 조절 탭이 달려 있습니다. 부드럽고 편안한 소재로 제작되었으며, 조절 가능한 Velcro®가 부착된 신축성 있는 밴드를 사용하여 팔에 잘 들어 맞습니다.

3단계 조절 탭이 달려 있어 환자의 가슴이나 팔 또는 침대 옆 기둥에 트랜스듀서를 일일이 수동으로 수평을 잡아 장착할 필요가 없습니다. Dale 트랜스듀서 홀더를 사용하면 환자의 이동에 대비하여 트랜스듀서를 환자의 신체에 부착하거나 침대 옆 기둥에 고정시키는 번거로움을 피하실 수 있습니다.

### 사용 방법:

1. 트랜스듀서 홀더를 흉부의 축 위치 (phlebostatic axis)에 대고환자의 팔에 감는다. Velcro를 눌러 고정시킨다.
2. 필요한 Velcro 탭을 열고트랜스듀서의 슬롯을 연결한 다음, 눌러 고정시킨다.

**다른 사용자와의 공동 사용을 금함.**

### 주문 정보

#H8410**6201** Dale® 트랜스듀서 홀더  
성인용. 날개 포장. 10개들이  
박스 판매.

Dale 의료 제품들은 가까운 병원/의료장비업체에서 구하실 수 있습니다. **라텍스 사용 안함.**

특허 출원중

Velcro는 Velcro USA, Inc.의 등록상표입니다.