

Número de produto

H84106201

Não esterilizado

Suporte para transdutores Dale®

O **suporte para transdutores Dale®** constitui uma plataforma nivelada e segura, capaz de suportar até três transdutores, para os doentes em vigilância hemodinâmica. A estabilidade do suporte para transdutores da Dale apoiará o funcionamento correcto da apresentação numérica correspondente quando posicionado de forma adequada no eixo flebostático. O suporte para transdutores Dale reduz a probabilidade de medições imprecisas devido a posicionamento ou nivelamento inadequado dos transdutores.

A plataforma adapta-se ao braço de cada paciente. A plataforma fornece a base sobre a qual estão colocadas as três abas de sustentação. A plataforma é constituída por um material macio e confortável e fixa ao braço com uma cinta elástica com fecho ajustável de Velcro®.

As três abas de sustentação reduzem o tempo e os problemas associados ao nivelamento manual e à fixação de transdutores individuais ao tórax ou ao braço do paciente ou à sua cabeceira. As dificuldades em fixar os transdutores ao doente ou em reposicionar a cabeceira devido à deslocação do doente são eliminadas com a utilização do suporte para transdutores Dale.

Instruções de aplicação:

1. Posicione o suporte ao longo do eixo flebostático (linha axilar) e envolva em torno do braço do doente. Pressione o Velcro para fixar.
2. Abra as abas de Velcro necessárias, passe através da(s) ranhura(s) do(s) transdutor(es) e pressione para fixar.

Para utilização num único doente.

Informações de encomenda

#H8410**6201** **Suporte para transdutores Dale®**

Adaptado à maioria dos adultos. Acondicionado em unidades individuais. Vendido em caixas de 10.

Os produtos clínicos da Dale estão disponíveis junto do seu agente de aprovisionamento hospitalar/clínico preferido. **Sem látex.**

A aguardar patente

Velcro é uma marca registada da Velcro USA, Inc.