

PRODUCTO NUMERO:

650/651/652

FERULA DOBLADIZA PARA BRAZO

Systema Completo

La Ferula dobladiza para brazo, posiciona y asegura la muñeca evitando movimientos inconvenientes durante la inserción y supervisión de líneas arteriales en el quirófano, unidades de recuperación y de cuidado intensivo. La Ferula para brazo puede moldearse a la posición deseada. Está cubierta con material suave y cómodo y se ajusta y se asegura con VELCRO®. Puede ser también asegurada para mantener el dedo pulgar fijo para la extensión de la muñeca dando mejor acceso a la arteria radial. Esto conduce a una intervención sin problemas y facilita la supervisión de la presión sanguínea arterial y los monitores de gases sanguíneos por periodos prolongados. El producto también puede usarse como una Ferula tradicional para las líneas periféricas de IV.

Con la Ferula Dobladiza de DALE

- La Posición de la muñeca se mantiene segura y evita movimientos inconvenientes
- Puede doblarse fácilmente y obtener la forma deseada
- El cierre se ajusta con VELCRO®
- Asegura el dedo pulgar durante la extensión de la muñeca y acceso a las arterias
- La Ferula dobladiza puede usarse para líneas periféricas de IV.

Instrucciones para aplicación:

1. Hiperextensión de la muñeca del paciente y alineamiento de la Ferula para brazo Doble la ferula hasta obtener la posición deseada (Figura A & B).
2. Coloque las cintas de VELCRO® alrededor de la mano y la Ferula hasta obtener la tensión deseada. Asegure el cierre con VELCRO® (Figura C).

Información de ordenes:

#H84106501 DALE® Ferula Dobladiza para Brazo

Talla Grande

Se vende en cajas de 10.

#H84106511 DALE® Ferula Dobladiza para Brazo

Talla Mediana

Se vende en Cajas de 10.

#H84106521 DALE® Ferula Dobladiza para Brazo

Talla Pequeña

Se vende en cajas de 10.

Los productos de DALE están disponibles en su hospital y distribuidor preferido. Estos productos están libres de latex.

Para un solo uso.

Patente de Estados Unidos #5,845,643

VELCRO® es una marca registrada de VELCRO USA, INC.

MEDICAL PRODUCTS, INC.,

Box 1556, PLAINVILLE, MA 02762-0556 USA

508 695 9316, FAX 1 508 695 9094

med.com