

Produkt-Nr. H84106601

Dale® Tracheostomietubushalter
Neu mit pilzresistenter Schutzschicht

Produktbeschreibung

Sorgt für einen sicheren Sitz des Tracheostomietubus. Die verjüngten, breiteren Befestigungslaschen sind pilzresistent und lassen sich schnell und leicht durch den Flansch des Tracheostomietubus einlegen. Das zweiteilige Nackenband enthält ein feuchtigkeitsabweisendes Futter und einen dehnbaren Abschnitt für Ödeme oder Hustenreflexe.

Befestigungsanweisung

1. Die Befestigungslaschen durch die Flanschen an der Tracheostomieplatte einlegen.
2. Die Laschen über den Flansch zurück biegen und am Nackenband befestigen oder zurück auf das weiche Material der Befestigungslasche biegen.
3. Die Befestigungslasche des kurzen Abschnitts am langen Nackenbandabschnitt befestigen. Für die richtige Länge und Kompression justieren.
4. Überschüssiges Material abschneiden.

Vorsicht: Nur in einem beaufsichtigten Umfeld verwenden. Stets überwachen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.

Nicht waschen. Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt.

Bestellinformationen

**H84106601 Dale® Tracheostomietubushalter
mit pilzresistenter Schutzschicht**

Passend für fast alle Ausführungen. Einzeln verpackt in einem Karton mit 10 Stück.

H84102401 Dale® Tracheostomietubushalter

Passend für fast alle Ausführungen. Einzeln verpackt in einem Karton mit 10 Stück.

**H84102421 Dale® Tracheostomietubushalter
für Neugeborene/Säuglinge**

Passend für Neonatal-/Säuglingsausführungen.
Einzeln verpackt in einem Karton mit 10 Stück.

H84102431 Dale® Verlängerung

15 cm lange Verlängerungslasche für H84106601 oder H84102401

HCPCS-Code: A7526

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für den Krankenhausbedarf und medizinische Produkte. **Latexfrei.**



Dale Medical Products, Inc.

7 Cross Street, PO Box 1556, Plainville, MA 02762 Tel: 800-343-3980 International:

508-695-9316

Fax: 508-695-6587

www.dalemed.com

Europäische Vertretung:
MDSS GmbH, Burckhardtstr. 1
D-30163 Hannover, Deutschland
Tel: +49 511 6262 8630 Fax: +49 511 6262
8633