

製品番号H84106601

Dale® 気管切開チューブホルダー
耐菌バリア付き

製品概要

気管切開チューブの安全な位置付けを提供します。先細りで、より広い留め具のタブは、耐菌性で気管切開チューブのフランジから素早く簡単に装着することができます。2つの部分からなるネックバンドには、耐湿性の裏層そして浮腫や咳の反射作用を可能にするストレッチ素材の部分が含まれます。

装着説明書

1. 気管切開プレートのフランジから留め具のタブを通します。
2. フランジの上にタブを戻して、ネックバンドにしっかりとくっつけるか、留め具のタブの柔らかい材質の部分に戻します。
3. 短い部分の留め具のタブを長いネックバンドの部分に固定します。適切な長さあるいは圧縮になるように調節してください。
4. 余分な部分を切り落としてください。

注意：管理された環境でのみ使用してください。
故意ではない抜管を防ぐために監視してください。
洗浄はしないでください。一人の患者にのみ使用。

注文お問い合わせ先

H84106601 **Dale® 気管切開チューブホルダー**
耐菌性バリア付き

大抵の患者に適合。1箱10個入りで個別包装。

H84102401 **Dale® 気管切開チューブホルダー**

大抵の患者に適合。1箱10個入りで個別包装。

H84102421 **Dale® 気管切開チューブホルダー**
新生児／乳児用

新生児～乳児に適合。

1箱10個入りで個別包装。

H84102431 **Dale® エクステンション**

H84106601用またはH84102401用の長さ6インチの拡張タブ

HCPCSコード：A7526

Daleの医療品は、ご希望の病院／医療器具販売店でご利用いただけます。ラテックスは含まれていません



Dale Medical Products, Inc.

7 Cross Street, PO Box 1556, Plainville, MA 02762

電話 : 800-343-3980 電話 (米国外) : +1-508-695-9316 ファクス : +1-508-695-6587

www.dalemed.com

EU販売代理店 :

MDSS GmbH, Burckhardtstr, 1

D-30163 Hannover, Germany

電話 : +49-511-6262-8630 ファクス : +49-511-6262-8633