

Dutch

1. De arm van de patiënt zachtjes door de opening van de
2. Draai de patiënt op zijn zijde en breng de achterkant van de bh aan op de rug van de patiënt.
3. Breng dan de tweede arm door de andere opening van de bh.
4. Sluit beide uiteinden van de bh door middel van de Velcro sluiting. (Oefen een zekere druk uit door middel van de bh.)
5. De bh kan gemakkelijk herplaatst worden door de Velcro sluitingen te herpositioneren.
6. De post-operatieve bh fixeert tevens op een optimale manier verbanden tot de volgende inspectieronde.