
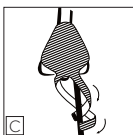
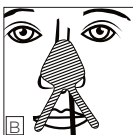
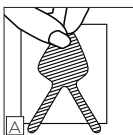


Dale®

Držák nasogastrické sondy

Pokyny k použití

1. Po zavedení NG sondy zajistěte, aby nos i NG trubice byly čisté a suché. Doporučujeme čištění podle nemocničního protokolu.
2. Odloupněte držák NG sondy z ochranné fólie od horní části nosní plochy. **(A)**
3. Vyrovnajte a aplikujte nosní plochu na nos v mírném úhlu k nosní dírce, do které je NG sonda zavedena. **(B)**
4. Vyberte chlopeň nejbližší sondě a začněte ji spirálovitě omotávat, aby většina NG sondy byla ve středu příslušné nosní dírky. **(C)**
5. Stejně spirálovitě omotejte i druhou chlopeň. **(C)**
6. Držák sondy vyměňujte po třech dnech, případně dříve, je-li to nutné.

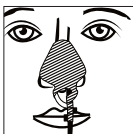

Odstranění

Držák NG sondy odstraníte jednoduše zatažením za nepřilnavé konce obou chlopní, které odmotáte ze sondy.

Následně opatrným tahem směrem nahoru odstraníte držák sondy z pacientova nosu.

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Medicínské produkty Dale jsou dostupné od vašeho dodavatele nemocničních/medicínských produktů.

Vyrobena bez použití přírodního latexu.

Dale® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

