
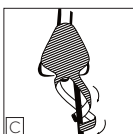
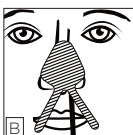
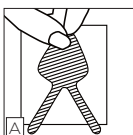


### Mode d'emploi pour l'application

1. Après la mise en place de la sonde NG, s'assurer que le nez et la sonde sont propres et secs. Nous recommandons un nettoyage conforme au protocole de l'hôpital.
2. Détacher le porte-sonde NG de son revêtement de protection en commençant par le haut du tampon nasal. **(A)**
3. Positionner et appliquer le tampon nasal sur le nez à un léger angle vers la narine dans laquelle la sonde NG a été insérée. **(B)**
4. Choisir la languette la plus proche de la sonde et commencer à l'enrouler en spirale de telle sorte que la plus grande partie de la sonde NG soit centrée sur la narine sélectionnée. **(C)**
5. Enrouler l'autre languette en utilisant la même technique en spirale. **(C)**
6. Changer la sonde au bout de trois jours, ou plus tôt si nécessaire.

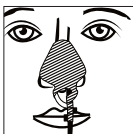

### Retrait

Pour retirer le porte-sonde NG du patient, tirer simplement sur les pointes non adhésives à l'extrémité de chaque languette pour les dérouler de la sonde.

Continuer à tirer doucement le porte-sonde vers le haut pour le retirer du nez du patient.

### À usage unique. Jetable.

Pour une vidéo d'application, veuillez vous rendre sur le site [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Les produits médicaux Dale sont disponibles en s'adressant à votre distributeur préféré de fournitures hospitalières/médicales.

### Ne contient pas de caoutchouc latex naturel.

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'UE.

TÉL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Allemagne

