
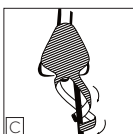
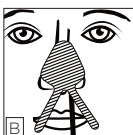
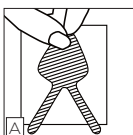


### Anwendung

1. Nach Intubation der NG-Sonde sicherstellen, dass die Nase des Patienten und die NG-Sonde sauber und trocken sind. Wir empfehlen eine Reinigung gemäß Krankenhausprotokoll.
2. Den NG-Sondenhalter – oben am Nasenpolster beginnend – von der Schutzfolie abziehen. **(A)**
3. Das Nasenpolster leicht schräg zum Nasenloch mit der NG-Sonde positionieren und an der Nase anbringen. **(B)**
4. Die der Sonde am nächsten liegende Lasche spiralförmig um die Sonde wickeln, damit der größte Teil der NG-Sonde im gewählten Nasenloch zentriert ist. **(C)**
5. Die andere Lasche auf gleiche Weise spiralförmig um die Sonde wickeln. **(C)**
6. Den Sondenhalter nach drei Tagen (oder früher, falls erforderlich) wechseln.

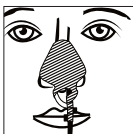

### Entfernen

Zum Entfernen des NG-Sondenhalters vom Patienten die nicht haftenden Enden der Laschen greifen und die Laschen von der Sonde abwickeln.

Den Sondenhalter weiter vorsichtig nach oben aus der Nase des Patienten herausziehen.

**Nur für den Gebrauch an einem Patienten bestimmt. Einwegprodukt.**

Ein Video der Anwendung finden Sie unter [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

Medizinische Produkte von Dale erhalten Sie von Ihrem bevorzugten Lieferanten für Krankenhausbedarf und medizinische Produkte.

**Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.**

Dale® ist eine eingetragene Marke von Dale Medical Products, Inc. in den USA und der EU.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Deutschland

