



### Istruzioni per l'applicazione


1. Con il sondino in posizione, verificare che sondino e naso siano puliti e asciutti. Se ne consiglia la pulizia in ottemperanza al protocollo ospedaliero.

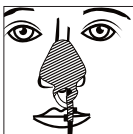


2. Staccare il rivestimento dal supporto a partire dall'apice superiore del cuscinetto per il naso (A).

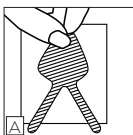

3. Applicare il cuscinetto sul naso, angolandolo leggermente in direzione della narice in cui è inserito il sondino (B).

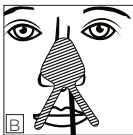

4. Scegliere il lembo più vicino al sondino nasogastrico e cominciare ad avvolgerlo a spirale in modo che il sondino sia centrato sulla narice prescelta (C).

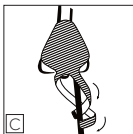

5. Avvolgere a spirale anche l'altro lembo (C).
6. Il supporto va cambiato ogni tre giorni o con maggiore frequenza se necessario.

### Rimozione

Per rimuovere il supporto dal paziente, basta retrarre le punte non aderenti dei lembi, separando quest'ultimi dal sondino.

Continuare a esercitare una delicata pressione verso l'alto sul supporto, staccandolo dal naso.

#### **Monopaziente. Monouso.**

Visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) per un video esemplificativo.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il distributore medico-ospedaliero preferito.

#### **Non prodotto con lattice di gomma naturale.**

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germania

