


Dale®


Holder for nasogastrisk sonde

Påsettingsanvisninger


1. Etter at den nasogastriske sonden er på plass, skal du påse at både nesen og sonden er rene og tørre. Vi anbefaler rengjøring i tråd med sykehusets retningslinjer.

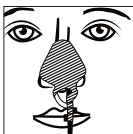


2. Skrell holderen for nasogastrisk sonde av bakpapiret ved å begynne øverst på neseputen (A).

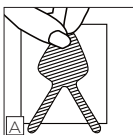

3. Posisjoner og påfør neseputen på nesen i svak vinkel mot neseboret som den nasogastriske sonden er satt inn i (B).

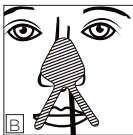

4. Velg fliken som er nærmest sonden, og begynn å vikle den i spiralform, slik at mesteparten av den nasogastriske sonden midtstilles på det aktuelle neseboret (C).

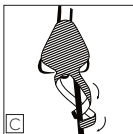

5. Vikle resten av fliken ved hjelp av samme spiralteknikk (C).
6. Bytt sondeholderen etter tre dager, eller tidligere hvis det er nødvendig.

Fjerne sondeholderen

Når du skal fjerne holderen for den nasogastriske sonden fra pasienten, trekker du tuppene på hver av flikene, som ikke kleber; bakover for å vikle dem av sonden.

Fortsett å dra sondeholderen forsiktig oppover for å fjerne den fra pasientens nese.

Bare til bruk på én pasient. Til engangsbruk.

Du finner en video om påsetting på www.dalemed.com

Medisinske produkter fra Dale fås hos forhandlere av sykehusutstyr / medisinske produkter.

Produsert uten lateks av naturgummi.

Dale® er et registrert varemerke som tilhører Dale Medical Products, Inc. i USA og EU.

TLF.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland

