
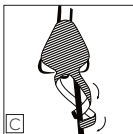
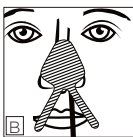
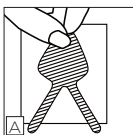


Dale®

Hållare för nasogastrisk sond

Appliceringsanvisningar

1. Efter att den nasogastriska sonden är på plats, säkerställ att näsan och den nasogastriska sonden är rena och torra. Vi rekommenderar att de rengörs enligt sjukhusets rutiner.
2. Dra av hållaren för nasogastrisk sond från skyddspapperet, med start längst upp på näsdynan. **(A)**
3. Positionera och applicera näsdynan på näsan något vinklad mot den näsborre som den nasogastriska sonden är införd i. **(B)**
4. Börja att linda fliken som är närmast sonden i spiral runt sonden, så att den nasogastriska sonden är väsentligen centrerad i näsborren. **(C)**
5. Linda den andra fliken i spiral runt sonden på samma sätt. **(C)**
6. Byt ut hållaren efter tre dagar eller tidigare om nödvändigt.

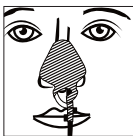

Borttagning

Ta av hållaren för nasogastrisk sond från patienten genom att helt enkelt dra i de icke självhäftande ändarna på varje flik och linda av dem från sonden.

Fortsätt att försiktigt dra sondhållaren i en uppåtgående rörelse för att ta bort den från patientens näsa.

För användning till en enstaka patient.

Engångsprodukt.

En video om applicering finns på

www.dalemed.com

Dale medicinska produkter fås från er försäljare av sjukhus-/medicinska produkter.

Ej tillverkad med naturgummilatex.

Dale® är ett registrerat varumärke som tillhör Dale Medical Products, Inc. i USA och EU.

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Tyskland

