


# Dale®

Supporti per cannula tracheostomica

## Istruzioni per l'applicazione

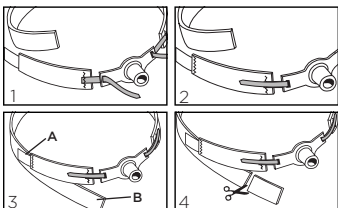

1. Far passare le linguette di aggancio lunghe e strette attraverso le flange poste sulla placca per tracheostomia.
2. Riportare le linguette sopra la flangia e farle aderire al collare.
3. Agganciare la linguetta del tratto più corto **(A)** allo spezzone più lungo del collare **(B)**. Regolare secondo la lunghezza o compressione desiderata.
4. Rifilare il materiale in eccesso **(solo B)** in modo da ottenere la lunghezza desiderata.

## Attenzione

Da utilizzare solo sotto il controllo di personale competente. Tenere sotto controllo per evitare che il dispositivo si sganci accidentalmente. Non ritagliare le linguette di aggancio.

### **Monopaziente. Monouso.**

Cambiare il supporto una volta al giorno o più spesso a seconda delle necessità. Cambiarlo dopo ogni bagno del paziente.

Per visionare un filmato sull'applicazione, visitare [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

I prodotti sanitari Dale sono reperibili presso il distributore abituale di forniture ospedaliere/sanitarie.

### **Non prodotto con lattice di gomma naturale.**

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germania

