


Dale®

Soportes para tubos de traqueostomía

Instrucciones para su colocación

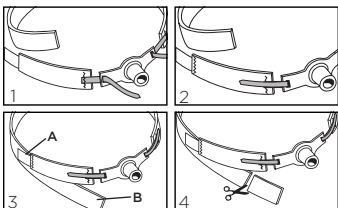

1. Pasar las lengüetas de sujeción angostas y alargadas a través de los orificios de las pestañas del dispositivo traqueal.
2. Una vez pasadas las lengüetas a través de las pestañas, tirar de ellas hacia atrás y fijarlas a la tirilla.
3. Asegurar la lengüeta de fijación del fragmento corto **(A)** al fragmento largo de la tirilla **(B)**. Ajustar a la longitud y compresión apropiadas.
4. Recortar el exceso de material **(B solamente)** para lograr el largo adecuado.

Precauciones

Utilizar sólo si el paciente se encuentra en una unidad de cuidados supervisados. Controlar para evitar el desprendimiento accidental. No recortar las lengüetas de sujeción.

Para uso exclusivo en un solo paciente. Desechable.

Cambiar el soporte a diario o con más frecuencia si es necesario. Cambiar después de bañar al paciente.

Para ver un video sobre cómo colocar el dispositivo, visite www.dalemed.com

Los productos médicos Dale se encuentran disponibles a través de su proveedor hospitalario/médico habitual.

Fabricado sin látex de caucho natural.

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

