

Dale®

Stabilock

Držák endotracheální trubice

Pro endotracheální trubice velikosti 7,0-10,0 mm

Pokyny k použití

1. Očistěte trubici. Nechte vyschnout.
2. Aplikujte podkladovou náplast. (A1-4)
3. Přitiskněte manžetu na část podkladové náplasti se suchým zipem. Kanálek musí být srovnán s endotracheální trubicí. (B)
4. Otevřete upevňovací pásky umístěné na obou koncích manžety a omotejte ji kolem hlavy hned pod ušima. Připevňte upevňovací pásky k vnější straně manžety. (C)
5. Zajistěte trubici v kanálku.
 - omotejte silnou lepicí pásku jednou kolem trubice v místě, kde kanálek trubici obepíná.
 - natlačte kanálek přes trubici
 - omotejte pásku kolem trubice a kanálku (D)

Alternativní způsob použití pásky:

- natlačte kanálek na trubici
 - pevně omotejte silnou lepicí pásku jednou kolem trubice a kanálku. **Omotejte páskou nejméně 2,5 cm od konce kanálku (D)**
6. Zajišťujte upevnění manžety opětovným uchycováním upevňovacích pásek podle potřeby.

Pásku vyměňujte podle potřeby.

Podkladovou náplast vyměňujte po třech dnech, případně dříve, je-li to nutné.

Odstranění

Podkladovou náplast odstraňujte jemně, aby se předešlo poranění kůže.

Přemístění trubice

Otevřete upevňovací pásky. Při odlupování manžety od podkladové náplasti tuto náplast přidržujte. Přemístěte trubicí. Přitiskněte zpět na podklad a zajistěte upevňovací pásky.

V zájmu předcházení ulcerace kůže a kožních trhlinek zkontrolujte před aplikací kůži a zdravotní stav pacienta. Monitorujte denně nebo častěji.

Dale **důrazně doporučuje často endotracheální trubicí přemísťovat**, aby se zabránilo poranění rtů a spodních tkání v důsledku stálého tlaku.

Dale **důrazně doporučuje používat podpěry trubic ventilátoru**, aby se snížil tlak na pacientovu tvář.

K použití pouze u jednoho pacienta. Na jedno použití.

Užitečný přehled pro správnou aplikaci

- ✓ **Připravte** kůži pokaždé, když se přikládá podkladová náplast
- ✓ **Umístěte** podkladovou náplast přímo nad úroveň rtů
- ✓ **Pevně spirálovitě omotejte** silnou lepicí pásku kolem kanálku a trubice
- ✓ **Zkontrolujte**, zda jste omotali páskou minimálně 2,5 cm trubice od konce kanálku
- ✓ **Odstraňujte** podkladovou náplast jemně, abyste minimalizovali poškození kůže
- ✓ **Používejte podpěry** trubice ventilátoru

Video s ukázkou aplikace najdete na webu www.dalemed.com

Vyrobeno bez použití přírodního latexu.

Dalé® je registrovaná ochranná známka společnosti Dale Medical Products, Inc. v USA a EU.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Německo

