

# Dale®

## Stabilock houder voor endotracheale tubes

geschikt voor endotracheale tubes van maat 7,0-10,0 mm

### Instructies voor het aanbrengen

1. Reinig de tube en laat hem drogen.
2. Breng de klevende basis aan. **(A1-4)**
3. Druk de halsband op de klittenbandhaakjes van de basis en zorg daarbij dat het tubekanaal op één lijn ligt met de endotracheale tube. **(B)**
4. Open de bevestigingslipjes aan beide uiteinden van de halsband en wikkel de band net onder de oren om het hoofd. Maak de bevestigingslipjes aan de buitenkant van de halsband vast. **(C)**
5. Zet de tube vast in het tubekanaal
  - wikkel sterke tape eenmaal om de tube op de plaats waar het kanaal de tube zal bedekken
  - druk het kanaal omlaag over de tube
  - wikkel tape om de tube en het kanaal **(D)**

Andere wijze van tappen:

- druk het kanaal op de tube
  - wikkel sterke tape nauwsluitend rond de tube en het kanaal. **Doe dit tot minstens 2,5 cm voorbij het uiteinde van het kanaal (D)**
6. Controleer of de halsband goed vastzit en stel de bevestigingslipjes zo nodig opnieuw af.

Vervang de tape indien nodig.

Verwissel de klevende basis na 3 dagen of sneller indien nodig.

### Verwijderen

De klevende basis moet voorzichtig worden verwijderd om beschadiging van de huid te voorkomen.

### Tube opnieuw positioneren

Open de bevestigingslipjes. Houd de klevende basis stevig vast terwijl u de halsband van de basis losmaakt. Positioneer de tube opnieuw. Druk hem opnieuw op de basis en maak de bevestigingslipjes vast.

Om verzwering of scheuren van de huid te voorkomen, dient u de huid en de medische gesteldheid van de patiënt te beoordelen alvorens het product aan te brengen. Voer dagelijks of vaker een controle uit.

Dale beveelt aan de endotracheale tube vaak opnieuw te positioneren om door aanhoudende druk veroorzaakt letsel aan de lippen en onderliggende weefsels te helpen voorkomen.

Dale beveelt ten zeerste aan slangen van het beademingstoestel te ondersteunen om de druk op het gezicht van de patiënt te verminderen.

**Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Disposable**

#### Handige checklist voor succesvol aanbrengen

- ✓ **Prepareer** de huid iedere keer dat de klevende basis wordt aangebracht
- ✓ **Positioneer** de klevende basis direct boven de liplijn
- ✓ **Wikkel sterke tape strak** rond het kanaal en de tube
- ✓ **Zorg** dat de tape minstens 2,5 cm voorbij het kanaal rond de tube is gewikkeld
- ✓ **Verwijder** de klevende basis voorzichtig om beschadiging van de huid te minimaliseren
- ✓ **Ondersteun** de slangen van het beademingstoestel

Een videofilmpje over het aanbrengen van de houder vindt u op [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**Niet vervaardigd met natuurrubberlatex.**

Dale® is een gedeponerd handelsmerk van Dale Medical Products, Inc. in de VS en de EU.

Dale Medical Products, Inc.  
TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Duitsland

EC REP

