

# Dale®

## Stabilock Support de sonde endotrachéale

s'adapte aux sondes endotrachéales de 7,0 à 10,0 mm de diamètre

### Instructions pour l'application

1. Nettoyez la sonde. Laissez-la sécher.
2. Appliquez la base adhésive. **(A1-4)**
3. Pressez le collier sur la portion « crochets » de la base en veillant à ce que le porte-sonde soit bien aligné sur la sonde endotrachéale. **(B)**
4. Ouvrez les languettes d'attache qui se trouvent aux extrémités du collier et faites passer le collier autour de la tête juste en dessous des oreilles. Sécurisez les languettes d'attache sur l'extérieur du collier. **(C)**
5. Attachez la sonde au porte-sonde.
  - enrroulez un ruban adhésif fort 1x autour de la sonde, à l'endroit où le porte-sonde recouvrira la sonde.
  - pressez le porte-sonde au-dessus de la sonde
  - enrroulez le ruban autour de la sonde et du porte-sonde **(D)**

Autre méthode possible pour appliquer le ruban:

- appuyez sur le porte-sonde pour l'enfoncer sur la sonde
  - enrroulez solidement le ruban adhésif fort autour de la sonde et du porte-sonde. **Enrroulez le ruban au minimum 2,5 cm au-delà de l'extrémité du porte-sonde (D)**
6. Assurez la sécurité du collier en réajustant les languettes d'attache selon les besoins.

Remplacez le ruban selon les besoins.

Changez la base adhésive au bout de trois jours ou plus tôt si nécessaire.

### Retrait

Retirez délicatement l'adhésif pour éviter un trauma de la peau.

### Repositionnement de la sonde

Ouvrez les languettes d'attache. Maintenez la base adhésive en place tout en retirant le collier de la base. Repositionnez la sonde. Pressez-la contre la base et attachez les languettes d'attache.

Pour éviter l'ulcération ou le déchirement de la peau, faites une évaluation de la peau du patient et de son état médical avant l'application. Surveillez quotidiennement ou plus souvent.

Dale **recommande fortement de repositionner souvent la sonde endotrachéale** afin de prévenir toute lésion des lèvres et des tissus sous-jacents causée par une pression continue.

Dale **recommande fortement de supporter la tubulure du ventilateur** pour réduire la pression sur le visage du patient.

**À usage unique. Jetable**

#### Liste de vérification pratique pour réussir l'application

- ✓ Préparez la peau chaque fois que vous appliquez la base adhésive
- ✓ Positionnez la base adhésive directement au-dessus de la lèvre
- ✓ Enroulez solidement un ruban adhésif fort autour du porte-sonde et de la sonde
- ✓ Assurez-vous de couvrir la sonde avec le ruban adhésif en dépassant le porte-sonde d'au moins 2,5 cm
- ✓ Retirez délicatement la base adhésive pour minimiser les lésions cutanées
- ✓ Supportez la tubulure du ventilateur

Pour visionner une démonstration de l'application, veuillez vous rendre sur le site [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.**

Dale® est une marque déposée de Dale Medical Products, Inc. aux É.-U. et dans l'U.E.

Dale Medical Products, Inc.  
TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

**MDSS GmbH**  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Allemagne

EC REP

