


Αυτοκόλλητη βάση

Οδηγίες εφαρμογής

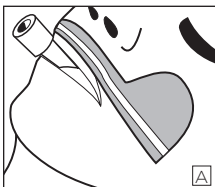

Για να αποφευχθεί εξέλκωση ή εκδορές του δέρματος, εκτιμήστε την κατάσταση του δέρματος του ασθενή και την ιατρική του κατάσταση πριν από την εφαρμογή. Να παρακολουθείται καθημερινά ή συχνότερα.

1. Εφαρμόστε προστατευτικό δέρματος.
2. Αφαιρέστε την προστατευτική επένδυση και τοποθετήστε την αυτοκόλλητη βάση στην επιθυμητή θέση **(A-D)**. Κόψτε την όπως απαιτείται.

Αλλάξτε τη βάση μετά από 3 ημέρες ή συντομότερα, εάν χρειάζεται.

Αφαίρεση

Το αυτοκόλλητο θα πρέπει να αφαιρείται με προσοχή, ώστε να μην τραυματιστεί το δέρμα.

Βίντεο επίδειξης της τεχνικής εφαρμογής θα βρείτε στον ιστότοπο www.dalemed.com

Για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Αναλώσιμο.

Δεν κατασκευάζεται από φυσικό λατέξ.

Το Dale® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Dale Medical Products, Inc. στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

ΤΗΛ.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Γερμανία

