



## 접착 베이스

### 도포 방법

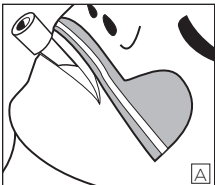

 피부 궤양 또는 피부 열상을 방지하기 위해, 도포하기 전에 환자 피부 및 의학적 상태를 평가하십시오. 매일 또는 더 자주 모니터링을 하십시오.

1. 피부 프레임을 바르십시오.
2. 라이너를 제거하고 접착 베이스를 원하는 위치(A-D)에 붙이십시오. 필요한 경우 끝 부분을 잘라 내어 다듬으십시오.

3일 후에, 또는 필요하면 더 빨리 베이스를 바꾸십시오.

### 제거

피부 외상을 방지하기 위해 접착 베이스를 주의하여 제거해야 합니다.

도포 시연 비디오를 보려면 [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) 을 방문하십시오.

**단일 환자용. 1회용.**

**천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.**

Dale®은 미국 및 EU에서 Dale Medical Products, Inc.의 등록 상표입니다.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)



**MDSS GmbH**

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany(독일)

