







Dale®

Hold-n-Place®

フォーリー カテーテル 脚用バンド

脚用バンドの装着方法

1. Dale社の商品ラベルが脚の内側に向くようにして脚用バンドを患者の大腿上部に回し引き伸ばしてマジックバンドのタブで留めます。バンドの下に無理なく指2本入れられるくらいが適切な圧着方法です。
2. フォーリー カテーテルを緑色タブの白い縫い目に合わせます。脚用バンドの上のカテーテルのループには十分ゆとりを持たせブラダーを引っ張らないようにします。引っ張る必要のある時はカテーテルを引き伸ばします。
3. カテーテルが必要な位置に来たら、幅の狭い緑色タブをカテーテルの上に挿入し、四角い開口部を通して緑色タブが重なるようにします。
4. 両方の緑色タブを反対方向にひいてタブをしっかりと留めます。カテーテルの位置を変えるには、緑色タブの一つを持ち上げ、カテーテルを調整してからタブを留め直します。
5. カテーテルの近接している方の端のYポートを固定装置に入れる固定方法もあります。

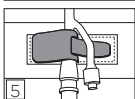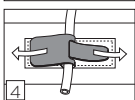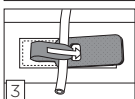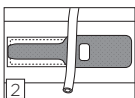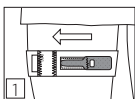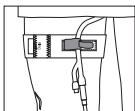

腰用ホルダーの装着方法

1. カテーテルを固定するには腰用バンドを傷害部より上の腹部に巻きます。体毛を剃る必要はありません。緑色カテーテル固定タブは排液部上中央に来るようにします。バンドの位置決め後、固定タブを腰用バンドに押し付けます。
2. カテーテルを緑色タブの白い縫い目に合わせます。
3. 上記の第3、4、5ステップを繰り返します。

その他の特長

開口部の炎症を避けるため、脚用バンドはどちらの方向にも回転させることができます。定期的にバンドを装着する脚を変えると患者さんも楽でしょう。

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

Dale®とHold-n-Place®は米国の Dale Medical Products, Inc. の登録商標です。

TEL.: +1-508-695-9316

www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany

