

Uygulama Talimatı


Dale Abdominal Korseler çeşitli büyüklüklerde mevcuttur. Çok iri bir hasta için iki korse birleştirilebilir.

1. Korseyi hastanın altına yerleştirin ve bir ucunu dışarı esnetin. Uygun esneme gereken kompresyonu sağlar.
2. Korseyi hastanın midesi üzerinden esnetin ve bir elle tutun. Korse düz olarak veya üst veya alt karın bölgesi üzerine ek basınç gerekiyorsa açılı yerleştirilebilir.
3. Diğer ucu istenen açıda esnetip getirin.
4. Korseyi esnetirken bastırıp kapatın.


Korseyi yeterince esnettiğinizden emin olun. Unutmayın ki sıkı bir uyum nefes almayı kısıtlamayacaktır; esneme ve kompresyon aslında derin solunumu kolaylaştırır.

Drenaj Tüplerinin Kullanımı

Dale Abdominal Korsede drenaj ve besleme amaçlı olanlar gibi bir tüpü yerleştirmek için bir delik kesilebilir. Korseyi hastaya yerleştirip drenaj bölgesi üzerinde tek bir tabaka olduğundan emin olun. Deliğin olması gereken yerde materyal üzerine bir X çizin, materyali buruşturun ve elips şeklinde bir kesi yapın (bakınız şekil). Materyal esneyince elips şeklinde kesi drenaj geçebileceği yuvarlak bir delik haline gelir. Deliğin çapı kesinin uzunluğuna eşit olacaktır.

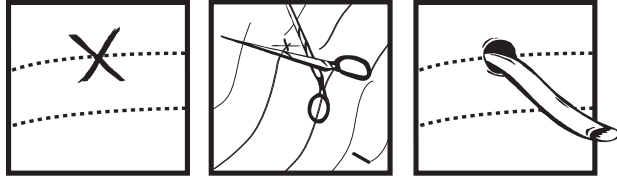


+EasyGrip™ Strip Uygulama

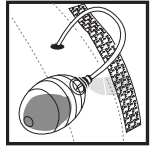



1. EasyGrip Stripi Korse den kaldırın.
2. Drenaj haznesi kullanımı için EasyGrip™ Stripi drenaj haznesi çıkıntısı içinden geçirin; tekrar korseye takın.
† Drenaj cihazları için en iyi uygulama standartlarını daima izleyin.

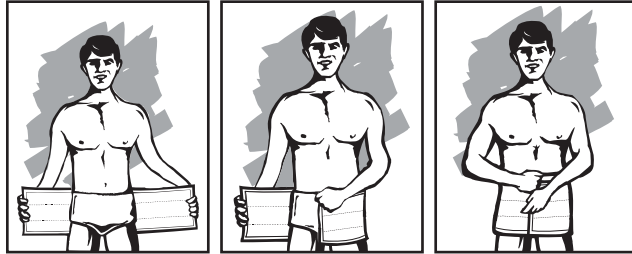

Kendi Kendine Uygulama



1. Üst kenarı göbeğin hemen altına koyun ve yana doğru esnetin.
2. Çevreden sarın.
3. Kapatmak için bastırın.

Yıkama ve Bakım

 Makinede SOĞUK suyla yıkayın  Veya elle yıkayın

 Çamaşır suyu kullanmayın  Asarak kurutun

Hafif bir deterjanla ve soğuk suyla, makineyle veya elle yıkayın. Yıkamadan önce Velcro yüzeylerin, Velcro lifleriyle etkileşime girip kilitleme özelliklerini zayıflatabilecek lif birikmesini önleyecek şekilde sağlamca kapatıldığınızdan emin olun. Asarak kurutun.

Sipariş Bilgisi

Dale Abdominal Korseler hastane/tıbbi malzeme satıcılarından, her pakette bir tane olmak üzere temin edilebilir.

Büyüklüğü bulmak için kadınlarda kalçayı, erkeklerde beli ölçün.

525	2 panel	6 inç (15cm) esneyip şuna uyar:28-50 inç	72-127 cm
410	3 panel	9 inç (23cm) esneyip şuna uyar:30-45 inç	76-114 cm
411	3 panel	9 inç (23cm) esneyip şuna uyar:46-62 inç	117-157 cm
418	3 panel	9 inç (23cm) esneyip şuna uyar:60-75 inç	152-191 cm
810	4 panel	12 inç (30cm) esneyip şuna uyar:30-45 inç	76-114 cm
811	4 panel	12 inç (30cm) esneyip şuna uyar:46-62 inç	117-157 cm
818	4 panel	12 inç (30cm) esneyip şuna uyar:60-75 inç	152-191 cm
820	4 panel	12 inç (30cm) esneyip şuna uyar:72-94 inç	183-239 cm
920	5 panel	15 inç (38cm) esneyip şuna uyar:72-94 inç	183-239 cm

Dale Abdominal Korse

Dale Abdominal Korse abdominal kasları desteklerken hareketliliğe ve kasların yeniden gelişmesine yardımcı olur.

Korse tamamen Dale'in Özel Esneme Materyalinden yapılmıştır ve daha hassas ve daha rahat bir uyum için her noktada Velcro® yoluyla kapanmaya izin verir. Esit dağılmış kompresyon öksürmeyi ve derin solunumu destekler. Hastalar daha rahat yürüyebilir ve böylece ateletaksi, pnömoni ve flebit gibi hareketsizliğe bağlı komplikasyonların olasılığı azalır.

Uygulamalar

Dale Abdominal Korse aşağıdakiler gibi işlemler sonrasında destek ve rahatlık sağlar:

- Sezaryen
- Hiposüksiyon
- Abdominoplasti
- Histerektomi
- Gastroplasti
- Doğum

Temel Özellikler

- **Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.** Hasta veya bacakların latex aşırı duyarlılığı endişelerini ortadan kaldırır.
- **Yeni ve yenilikçi birleştirici dikiş.** Açıklık bırakmayan dikiş daha fazla hasta rahatlığı sağlar.
- **Esit dağılmış kompresyon.** Dale'in Özel Esneme Materyali üst üste binme, halat haline gelme veya sıkıştırma olmadan kompresyonu daha düzgün şekilde dağıtır.
- **Daha uzun ürün ömrü.** Materyal sınırsız kere birleştirilip ayrılabilir. Bir miktar tüylenme olabilir ama bu aslında tutma gücünü daha da artırır.
- **Kanca ve halka kapakları.** Korse yara ve pansuman incelemesi için kolayca açılır ve kapanır. Tam uyum için çevresinin herhangi bir kısmında tutturulabilir.
- **EasyGrip Strip.** Abdominal korse dışında dört adede kadar drenaj haznesi tutar.

Tek hastada kullanılmak üzere dir.

Uygulama videosu için lütfen www.dalemed.com web sitesine gidiniz.

Doğal kauçuk lateksle üretilmemiştir.

Dale®, ABD ve AB'de Dale Medical Products, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır. EasyGrip™ ABD'deki Dale Medical Products, Inc. şirketinin ticari markasıdır.