

(\*Access Controller for Enteral [enteraalisen käytön hallinta])  
Toimii avoimien tai suljettujen enteraalisten järjestelmien kanssa.

**ACE Connector** -liitin on tarkoitettu lääketieteellisten letkujen tulo- ja poistovirtauksen säätöön enteraaliruokinnan, ruiskuhuuteluun ja nestelääkityksen yhteydessä ilman, että nesteiden syöttöletkuja tarvitsee katkaista, jopa 30 päivän ajan. Tämä suljettu järjestelmä suojelee terveydenhuollon ammattilaista vahingossa tapahtuvasta altistumiselta potilaan mahanesteille.

## KÄYTTÖOHJEET

### 1 Syöttäminen

**ACE Connector** korvaa enteraaliseen ruokintaan käytettävät PEG-/G-letkujen sovitimet.

- Liitä katetrin liittinpää ruokintaletkuun.
- Työnnä ruokintaletkun tai bolusruiskun kärki valkoiseen joustavaan sovittimeen.
- Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää ruokinnan.
- Käännä kahva POIS-asentoon, kun potilas on ruokittu, ja irrota ruokintaletku valkoisesta joustavasta sovitimesta.

Kun **ACE Connector** -liittintä käytetään NG-letkujen kanssa ruokintaan, liitä katetrin liittinpää suoraan NG-letkuun. Seuraa yllä mainittuja kohtia b–d.

### 2 Katetriäkärkinen huhteluruisku / lavaatio ja nestemäisen lääkkeen antaminen

Turvaominaisuutena **ACE Connector** -liittimen kärkeen sopivat vain katetriäkärkiset huhteluruiskut. Siihen eivät sovi luer-kärkiset annosteluletkut tai ruiskut.

- Käännä kahva POIS-asentoon.
- Kun pitelet **ACE Connector** -liittintä, **työnnä ja kierrä** katetrin kärjen ruisku lujasti ensisijivyyään ruiskun venttiiliuukkoon, kunnes liitos on tiivis.
- Annostele neste tai lääke **ACE Connector** -liittimeen.
- Irrota ruisku. Automaattisen tiivisteen ruiskuportti sulkeutuu automaattisesti.
- Huuhtele lämpimällä vedellä automaattisen tiivisteen ruiskuportin kautta.

### 3 Dreenaus ja imu

**ACE Connector** korvaa "5-in-1"-tyyppiset liittimet, joita käytetään Salem-, Levin- ja mahaletkujen kanssa.

- Irrota potilasletkusta siinä mahdollisesti oleva "5-in-1"-liitin.
- Liitä katetrin liittinpää potilasletkuun.
- Irrota valkoinen joustava sovitin ja kiinnitä imuletku suoraan **ACE Connector** -liittimeen.
- Käännä kahva AUKI-asentoon, kun haluat käynnistää imun tai valutuksen.
- Käännä kahva POIS-asentoon ja irrota haluttaessa imuletku.

### Potilaskahtainen.

Säilytettävä viileässä ja kuivassa.

Yhdysvaltain lain mukaan tämän välineen saa myydä ainoastaan lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

- Jos potilaan tarvitsee liikkua, käännä kahva POIS-asentoon ja irrota ruokinta- tai imuletku. Potilas voi liikkua tämän jälkeen tarpeen mukaan. Ruokinta tai dreenaus voi tarvittaessa jatkuva tämän jälkeen edellä kuvatulla tavalla.
- Vaihda tarpeen mukaan. Ei suositella yli 30 päivää kestäväan käyttöön.
- Siinä tapauksessa, että laite ei toimi ohjeen mukaisesti tai odotetulla tavalla, huuhtelee **ACE Connector** -liitin perusteellisesti ohjeiden mukaan ja tarkista enteraaliruokinnan asetukset. Jos ongelmia toistuu, vaihda uusi **ACE Connector** -liitin ja enteraaliruokinnan asetukset noudattamalla sairaalan "enteraaliruokinnan hallinnan" protokollaa.
- ACE Connector** tarjoaa ensisijaisesti menetelmän potilaan enteraaliruokintaan. Lääkkeitä annettaessa tulee noudattaa sairaalan tai laitoksen enteraaliruokinnan hallinnan protokollaa.

Dale lääketieteellisiä tuotteita on saatavana sairaala- ja lääkintätarvikkeiden myyjiltä.

Yhdysvaltain patentti nro 8,353,895

### Tilaustiedot

475

Dale ACE Connector®  
Yksittäispakattu.  
Myydään 50 kpl:n laatioissa.

**Dale**



Dale Medical Products, Inc.  
40 Kenwood Circle • Suite 7  
Franklin, MA 02038-3298, USA  
Puhelin: 508-695-9316  
www.dalemed.com

Valmistettu Kinassa 942183-ART\_REV\_J

©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale® ja ACE Connector® ovat Dale Medical Products, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja EU:ssa.



MDSS GmbH  
Schiffgraben 41  
D-30175 Hannover, Saksia



Ei ole tehty luonnunkumista  
eli latoksista

