

(*Styremekanisme til enteral adgang)

Virker med åbne eller lukkede enterale systemer, der er i overensstemmelse med ISO 80369-3.

BRUGSANVISNING

1 Ernæringsproceduren kan bruges med ENFit-ernæringssonder med lille åbning, herunder Dobhoff, PEG, PEJ, BRT gastrostomi, G/J, administrationsåbning til ernæring og Især Salem Sump® sonder, der er udstyret med ENFit-konnektorer.

Hvis ACE Connector bruges til enteral ernæring, skal ACE's ENFit hun-konnektors distale port tilsluttes ernæringssondens ENFit han-konnektor. Følg anvisningerne i a-d nedenfor.

- Slut ACE's ENFit hun-port (distale side) til ENFit han-konnektoren på patientens ernæringssonde.
- Skru ernæringssåttets ENFit hun-konnektor lige på ACE Connectors ENFit han-port (proksimale side).
- Drej håndtaget over på TIL for at tilføre ernæring.
- Drej håndtaget over på FRA, når ernæringstilførslen er færdig, og skru ernæringsåttet af ACE Connector.

*PEG-sonder uden ballon kan nødvendigvis brug af en hvid 80369-3 ENFit overgangskonnektor eller en universaladapter, som ikke leveres sammen med ACE Connector.

2 Fremgangsmåde til lavage/administration af flydende medicin med 60 ml skyllesprøjte med ENFit-spids

Som sikkerhedsforanstaltning kan den nye ACE Connector kun passe sammen med enterale skyllesprøjter med ENFit-spids og ikke sammen med sprøjter med kateterspids, sprøjter med Luer-spids, administrationsåbning med Luer-spids eller subkutane kanyler.

- Drej håndtaget over på FRA.
- Hold fast på ACE Connector og tryk og drej sprøjten med ENFit hun-spidsen lige ind i Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil den stopper. - **STRAM IKKE FOR MEGET!** Det anbefales kraftigt at gennemskylle før og efter brug.
- Tilfør væske eller medicin gennem ACE Connector Auto-Seal medicinsprøjteport, eller udtag residualvæske fra ventrikkil, hvis relevant.
- Fjern sprøjten. Grænsefladen mellem Auto-Seal medicinsprøjteporten og ENFit han-konnektoren lukker automatisk tæt til.
- Skyl med vand gennem Auto-Seal medicinsprøjteporten, indtil alle medicinrester er væk.
- Drej håndtaget over på TIL.

Produktet er kompatibelt med ENFit overgangstrikkonnektor og ENFit tragtkonnektorer.

3 Drænage og udsugningprocedure

ACE 485 Enteral Connector kan anvendes til udsugning og drænage med særligt udstyrede ENFit Salem Sump-sonder og Sugeslanger med en særlig ENFit-adapter.

4 MR Conditional  Ikke-klinisk afprøvning har påvist, at Dale Medical 485 ENFit ACE CONNECTOR kan MR-scannes under visse betingelser. Patienter med dette produkt kan MR-scannes sikkert umiddelbart efter anlæggelse under følgende betingelser:

- Kun statisk magnetfelt på 1,5 Tesla og 3 Tesla.
- Spatial magnetfeltstyrke for gradient på maks. 3000 Gauss/cm.

Til brug til en enkelt patient / Opbevares køligt og tørt

Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges af en læge eller på en læges ordination.

- Patienten ambuleres ved at dreje håndtaget over på FRA og frakoble ernæringsåttet. Patienten kan derefter bevæge sig frit. Ernæring kan genoptages efter behov ved at gentage ovenstående fremgangsmåde. ACE Connector bliver siddende på kateteret i overensstemmelse med godkendt, medicinsk praksis.
- Udskiftes efter behov ifølge hospitalets protokol. Anvendelse i mere end 30 dage anbefales ikke.
- Hvis ACE Connector ikke yder som forventet eller ifølge anvisningerne, skal den gennemskylles grundigt ifølge anvisningerne, og tilslutningen af ernæringssonden skal efteres. Hvis problemet vedvarer, skal ACE Connector og ernæringsåttet udskiftes med nye dele efter behov og ifølge hospitalets protokol for enteral ernæring.
- ACE Connector er primært en metode til enteral ernæring af patienter. Ved administration af medicin skal hospitalets eller facilitetens protokol for enteral ernæring følges.

Medicinske produkter fra Dale kan fås hos forhandlere af hospitalsudstyr/medicinsk udstyr.

Amerikansk patentnummer D800899

Bestilling**485**

Dale ACE Connector®
Individuelt pakket.
Sælges i æsker med 50 stk.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Tyskland



Fremstillet uden
naturgummilatex



Fremstillet i Kina 942253-ART_REV_C
©2018 Dale Medical Products, Inc.

Dale® og ACE Connector® er registrerede varemærker tilhørende Dale Medical Products, Inc. i USA og EU. ENFit® er et registreret varemærke tilhørende GEDSA, anvendt med deres tilladelse.