
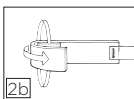


Dale®

Supporto per tampone nasale

Istruzioni per l'applicazione

1. Centrare la sezione in plastica del supporto sul tampone nasale e sotto il naso del paziente. Fissare il supporto in posizione facendone passare le anse dietro le orecchie.
2. Per regolare la misura (dall'orecchio al naso):
 - a. Sollevare l'estremità del nastro e riposizionare l'ansa fino ad ottenere la distanza desiderata. Ripetere sull'altro lato.
 - b. Piegarlo l'estremità del nastro sopra l'ansa. Il nastro in eccesso può essere accorciato con le forbici.

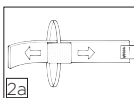

Cambio del tampone nasale

Per cambiare tampone, liberare un orecchio dall'ansa, cambiare tampone e far passare di nuovo l'ansa dietro l'orecchio del paziente.

Monopaziente. Monouso.

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

I prodotti medici Dale sono disponibili presso il fornitore ospedaliero/sanitario preferito.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.



Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: 508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germania

