
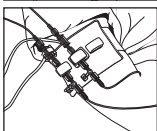
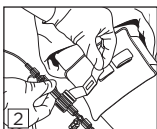


Dale®

트랜스듀서 홀더

착용 방법

1. 홀더를 우심방축(흉부 중앙)을 따라 위치시키고 환자의 팔을 감싸십시오. 후크 및 루프 클로저를 눌러 고정시키십시오.
2. 필요한 후크 및 루프 탭을 열고, 트랜스듀서(들)의 가느다란 구멍(들)을 빠져나가 눌러 고정시키십시오

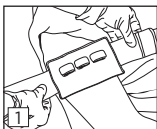

단일 환자용. 1회용

착용 시연 영상을 보시려면, www.dalemed.com을 방문하십시오.

천연 고무 라텍스로 제조되지 않음.

Dale®은 미국과 유럽연합에 등록된 Dale Medical Products, Inc.의 상표입니다.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germany (독일)

