

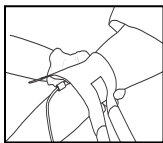
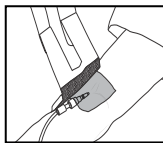



Istruzioni per l'applicazione

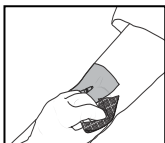


Applicazione anticubitale

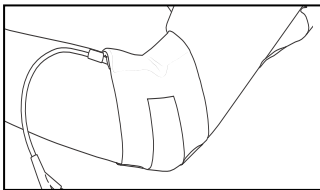


Applicazione sulla mano

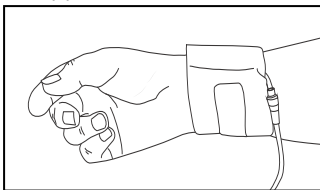

Applicazione sull'avambraccio

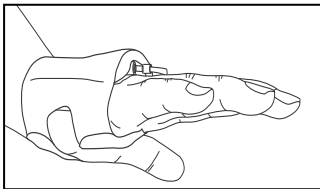

Per ulteriori informazioni, vedere il verso.

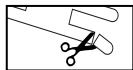

Può essere tagliato su misura

Informazioni sugli ordinativi

675

Dale® IV-ARMOR®

Adatto alla maggior parte delle persone

10 per scatola

Non prodotto con lattice di gomma naturale

Brevetto di design № D663,021

In attesa di brevetto

Monouso. Monopaziente.




Dale Medical Products, Inc.
40 Kenwood Circle • Suite 7
Franklin, MA 02038-3298
T: +1-508-695-9316



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germania




Visit Us Online:
dalemed.com

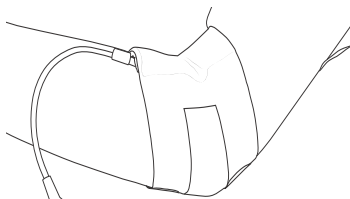


Istruzioni per l'applicazione

1. Predisporre e cerottare la linea IV in conformità al protocollo ospedaliero.
2. Strofinare in modo uniforme il preparato di pulizia e antisepsi della cute sulle aree cui aderisce il cerotto. Lasciarlo asciugare per circa 30 secondi.
3. Centrare il tampone sull'IV e la medicazione. Determinare se la lunghezza dei lembi vada ridotta per evitare sovrapposizioni. Se necessario, tagliarli prima di rimuovere il rivestimento.


*Non tagliare da un lato più di 5 cm. Se bisogna accorciare la copertura per più di 5 cm, rifilare il secondo paio di lembi del prodotto.

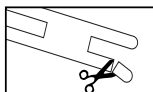

4. Staccare il rivestimento e premere il prodotto, facendolo aderire al paziente con moto continuo, un lato per volta. Non stirare la copertura durante l'applicazione.

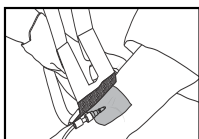

Rimozione: il dispositivo va rimosso con cura per evitare di traumatizzare la pelle. Riapplicare il preparato di pulizia e antisepsi della cute prima di usare un dispositivo nuovo.

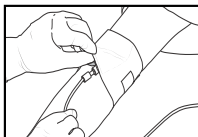

Per ispezionare il sito di inserzione intravenosa, sollevare la sezione centrale del prodotto per visualizzare l'area interessata.

Mantenere la copertura pulita e asciutta
Cambiare dopo 3 giorni o prima se necessario