

Dale®

Sostén postquirúrgico

Instrucciones de colocación

1. Desprenda los tirantes y coloque el sostén (brasier o sujetador) debajo de la paciente.
2. Agarre los dos lados del sostén y haga presión para unirlos. Debe quedar cierta tensión.
3. Acople los tirantes a la parte delantera del sostén en la parte superior de la banda.
4. El sostén puede ajustarse fácilmente separando las uniones de la parte delantera y los tirantes.



Colocación alternativa

El sostén postquirúrgico Dale también se puede poner sin desprender los tirantes: guíe suavemente los brazos de la paciente a través de los tirantes.

Lavado y cuidados



Lavar a máquina con agua tibia.



Secar colgado en tendedero.



No usar lejía.



No planchar.



No limpiar en seco.

Para utilizar en una sola paciente. Desechable.

Para ver un video sobre cómo colocar la prenda, visite www.dalemed.com

Fabricado sin látex de goma natural.

Dale® es una marca comercial registrada de Dale Medical Products, Inc. en los EE.UU. y la UE.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Alemania

