

Dale®

Reggiseno post-chirurgico

Istruzioni per l'applicazione

1. Staccare le spalline e stendere il reggiseno sotto la paziente.
2. Afferrare i lati del reggiseno e premerli assieme. Il reggiseno deve essere un po' teso.
3. Far aderire le spalline alla parte anteriore del reggiseno, in cima alla fascia.
4. La misura del reggiseno può essere regolata facilmente separando gli agganci anteriori e le spalline.



Applicazione alternativa

Il reggiseno post-chirurgico Dale può essere indossato senza staccare le spalline, infilando gentilmente le braccia della paziente attraverso le spalline.

Lavaggio e cura



Lavare in lavatrice con acqua calda.



Asciugare all'aria.



Non usare candeggina.



Non stirare.



Non pulire a secco.

Monopaziente. Monouso

Per un video illustrante l'applicazione, visitare www.dalemed.com.

Non contiene lattice di gomma naturale.

Dale® è un marchio depositato di Dale Medical Products, Inc. negli USA e nell'UE.

Dale Medical Products, Inc.
TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover, Germania

