

Dale®

Hold-n-Place® カテーテル固定装置

装着方法

1. IV及び動脈カテーテルは、Luer接続が挿入したカテーテルに付いていること。
2. 病院の手順に従って肌を消毒し準備します。
3. 患者によっては、粘着力を上げるため体毛を剃り肌の準備をする必要があるかもしれません。
4. 固定装置を付ける前に肌が清潔で乾燥していることを確かめます。
5. 先端部の粘着PULLタブを2つのストリップの切れ目まで引きます。(A)
6. 固定装置をカテーテル/シースの下に滑らせて入れ、カテーテルチューブがハブと合い、ベースの中央部の伸ばした点の上の真ん中に来るようにします。(B)
7. ハブを上からそっと押し、露出した粘着部に固定させます。(B)
8. 固定装置とカテーテルを動かないように抑えながら、底部のリリースライナーを引いて粘着部を肌にし当てます。反対側も同じようにします。(C)
9. PULLタブを完全にはがし粘着ストリップを露出させます。(D)
10. 粘着ストリップをカテーテルハブの向こう側まで持って行き、粘着ストリップの上側をそっと押しながら固定させます。もう一つの粘着ストリップも同じようにして山形に固定します。(E)
11. 固定装置を押し付けて、しっかり貼り付けます。
12. 挿入部の上に透き通ったドレッシング材を付けます。固定装置全体に透き通ったドレッシング材を付けることもできますが、取替えを容易にするため、半分まで付けることをお勧めします。
13. ドレッシング材の取替え間隔は病院の手順に従ってください。液体で汚れたり濡れてしまった場合は、固定装置を取り換えてください。

固定装置を付ける際ラインあるいはチューブが動かない助けとしてテープ・ストリップが入っています。

取外し方法

取外し易くするため、アルコールスワブを使用することもできます。

注文情報

850	ホールド・イン・プレースIV、動脈及びミッドライン・カテーテル固定装置。	一箱50個入り。
851	ホールド・イン・プレースIV、Prevantics®入りIVスタートキット付き動脈及びミッドライン・カテーテル固定装置。	一箱50個入り
852	ホールド・イン・プレースCVC、PICC及び動脈シース固定装置。	一箱50個入り
853	ホールド・イン・プレースCVC、大型透明ドレッシング材付きPICC及び動脈シース固定装置。	一箱50個入り

一人の患者のみに使用。使い捨て用。
取扱説明ビデオは、www.dalemed.comでご覧になれます。

STERILE R

Dale 医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

特許出願中

Dale®とHold-n-Place®は米国の Dale Medical Products, Inc. の登録商標です。

TEL.: +1-508-695-9316
www.dalemed.com



MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

946001 REV E

©Copyright 2019

Japanese

