

Dale®

Hold-n-Place®

แผ่นยึดหลอดเลือด

คำแนะนำวิธีการใช้

1. สำหรับ IV และหลอดเลือดเส้นเลือดแดง การเชื่อมต่อ Luer ควบคู่กันเพื่อสอดหลอดเลือด
2. ทำความสะอาดและเตรียมผิวหนังตามเกณฑ์วิธีของโรงพยาบาล
3. โน้มนำด้วยรายชื่อข้อต่อโกลนนอกหรือเข็มผิวหนังเพื่อให้ง่ายต่อการติดได้ดีขึ้น
4. จะต้องมั่นใจว่าผิวหนังสะอาดและแห้งก่อนใส่แผ่นยึด
5. ดึงแถบกระดาษบนออก ดึง (PULL) แถบไปไว้ แผ่นกาวที่มีรูพรุน (A)
6. สอดแผ่นยึดให้อยู่ด้านในของหลอดเลือด ปิดจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่หลอดเลือดสอดเข้ากับจุดศูนย์กลาง และอยู่ตรงกลางบนจุดศูนย์กลางของฐาน (B)
7. กดด้านบนจุดศูนย์กลางเบา ๆ เพื่อให้กาวติดแน่น (B)
8. จับแผ่นยึดและหลอดเลือดให้อยู่ในตำแหน่งขณะดึงวัสดุที่เชื่อมด้านข้างและกดแผ่นกาวเข้ากับผิวหนัง ปฏิบัติอย่างเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง (C)
9. ดึง (PULL) แถบออกให้หมดเพื่อให้เห็นแถบกาว (D)
10. ยึดแถบกระดาษหนึ่งและพับครึ่งกลางบนจุดศูนย์กลางหลอดเลือด กดด้านบนแผ่นกาวเบา ๆ จากนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกันบนแผ่นกาวอีกด้านเพื่อให้เป็นรูปตัว วี (E)
11. กดแผ่นยึดลงเพื่อให้แน่ใจว่าการยึดติดดีขึ้น
12. ได้ทำปัดแผลโดยจุดยึดเกาะ คุณสามารถใช้ผ้าปิดแผลไฮโปอัลเลอร์เจนิกปิดทับหมัด อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ปิดอุปกรณ์แผ่นยึดเฉพาะครึ่งหนึ่งเพื่อทำการเปลี่ยนผ้าปิดแผลเป็นไปได้ง่าย
13. สำหรับการเปลี่ยนผ้าปิดแผลระหว่าง ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์วิธีของโรงพยาบาล ทำการเปลี่ยนแผ่นยึดหากสปรกหรือเปียกชื้นด้วยของเหลว

ได้จัดรวมแผ่นพยาบาลเพื่อช่วยให้สายหรือหลอดม้วนคงจะใช้กับแผ่นยึด

การถอดออก

ใช้วัสดุซับแอลกอฮอล์เพื่อช่วยในการถอดออก

ข้อมูลการสั่งซื้อ

850	Hold-n-Place IV, แผ่นยึดหลอดเลือดและแนวกลางของหลอดเลือด	50/กล่อง
851	Hold-n-Place IV, แผ่นหลอดเลือดเปิดเลือดและแนวกลางของหลอดเลือดพร้อม Preventics® ในชุดอุปกรณ์เริ่ม ไอวี	50/กล่อง
852	Hold-n-Place CVC, PICC และแผ่นยึดหลอดเลือดชนิดปลอก	50/กล่อง
853	Hold-n-Place CVC, PICC และแผ่นยึดหลอดเลือดชนิดปลอกพร้อมผ้าปิดแผลใส	50/กล่อง

สำหรับใช้กับผู้ป่วยรายเดียว ใช้แล้วทิ้ง
หากต้องการชมวิดีโอแสดงวิธีการใช้ กรุณาไปที่
www.dalemed.com

STERILE R

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของ Dale มีจำหน่ายที่โรงพยาบาล/สถานจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของท่าน

ไม่ได้ผลิตจากยางลาเทกซ์ธรรมชาติ.

กำลังอยู่ในระหว่างการขอสิทธิบัตร

Dale® & Hold-n-Place® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dale
Medical Products, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

โทรศัพท์: +1-508-695-9316
www.dalemed.com

EC REP

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

D-30175 Hannover, Germany

946001 REV E

©Copyright 2019

Thai
1

