

# Dale®

Hold-n-Place®  
汎用固定装置

## 装着方法

1. ライン又はチューブ設置後、病院の手順に従って肌を消毒し準備します。
2. 患者によっては、粘着力を上げるため体毛を剃り肌の準備をする必要があるかもしれません。
3. 固定装置を付ける前に肌が清潔で乾燥していることを確かめます。
4. 上部の布のストラップを持ち上げ、PULLライナーを取り外します。(A)
5. 固定装置をライン又はチューブの下に滑らせて入れ、露出した粘着部の真ん中に来るようにします。(B)
6. 上部の布ストラップをライン又はチューブの上に置き面ファスナーを押し付けます。(C)
7. 底部のリリースライナーを引いて粘着部に肌を押し当てます。反対側も同じようにします。(D)
8. 固定装置を肌に押し付けます。
9. 液体で汚れたり濡れた場合は固定装置を取り換えてください。

固定装置を付ける際にライン又はチューブが動かないようにするテープストラップが中小サイズのものには入っています。

## 取外し方法

取外し易くするため、アルコールスワブを使用することもできます。

## 注文情報

950	小、1.5mm~4.5mmのチューブ用	一箱50個入り
951	中、3mm~8mmのチューブ用	一箱50個入り
952	大、6mm~13mmのチューブ用	一箱50個入り

一人の患者のみに使用。使い捨て用。

**STERILE R**

取扱説明ビデオは、[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)でご覧になれます。

Dale医療用品は優先病院・医療用品ディーラーよりお求めください。

天然ゴムラテックスは含まれていません。

特許出願中

Dale®とHold-n-Place®は米国のDale Medical Products, Inc.の登録商標です。

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

