

# Dale®

Hold-n-Place®  
Genel Amaçlı Sabitleyici

## Uygulama Talimatları

1. Hat veya hortum yerleştikten sonra cildi hastane protokolüne göre temizleyip hazırlayın.
2. Daha iyi yapışma sağlamak için bazı hastalarda tüyleri almak veya Skin Prep kullanmak gerekebilir.
3. Sabitleyici malzemeyi uygulamadan önce cildin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
4. Üstteki bez şeridi kaldırmak ve **PULL** ("çek") yazılı astarı çıkarın. **(A)**
5. Sabitleyici malzemeyi hattın veya hortumun altına kaydırın ve ortaya çıkan yapışkan yüzeyin üzerinde ortalayın. **(B)**
6. Üstteki bez şeridi hattın veya hortumun üzerine getirin ve kanca malzemeye bastırın. **(C)**
7. Altındaki kağıt astarın bir kenarını çekin ve yapıştırıcıyı cilde bastırın, işlemi diğer taraf için tekrarlayın. **(D)**
8. Sabitleyici malzemeyi cildin üzerine bastırın.
9. Sıvı ile kirlenir veya satüre olursa sabitleyici malzemeyi değiştirin.

Sabitleyici malzemeyi uygularken hattın veya hortumun dengelenmesine yardımcı olması için küçük ve orta boy için Şeritler bulunmaktadır.

## Çıkarma

Çıkarmayı kolaylaştırmak için alkollü mendil kullanılabilir.

## Sipariş Bilgileri

<b>950</b>	Küçük, 1,5 mm - 4,5 mm tübaja uygun	50/kutu
<b>951</b>	Orta, 3 mm - 8 mm tübaja uygun	50/kutu
<b>952</b>	Büyük, 6 mm - 13 mm tübaja uygun	50/kutu

**Tek hastada kullanım içindir.**  
**Tek kullanımlıktır.**

**STERILE R**

Uygulama videosu için [www.dalemed.com](http://www.dalemed.com) adresini ziyaret ediniz

Dale medikal ürünler istediğiniz hastane/tıbbi malzeme satıcısında bulunabilir.

**Doğal kauçuk lateks içermez.**  
**Patent Başvurusu Yapılmıştır**

Dale® & Hold-n-Place® Dale Medical Products, Inc.'in ABD ve AB'de tescilli ticari markalarıdır.

TEL.: +1-508-695-9316  
[www.dalemed.com](http://www.dalemed.com)

